



AirFit™ N20



Se ajusta fácilmente a ellos
y a toda persona que se
encuentre en el medio

El rostro de cada persona es diferente. Pero con nuestra nueva serie AirFit™ 20, ajustarse a un amplio rango de pacientes nunca ha sido tan fácil. Eso es porque cada mascarilla se ha diseñado especialmente para ajustarse a todos los pacientes, más allá de su perfil facial, lo cual elimina las constantes conjeturas en la selección de la mascarilla. Y con un reciente estudio internacional que demostró que la serie AirFit N20 se ajusta al 99 % de los pacientes,¹ usted puede confiar en que tendrá un buen desempeño en su diverso grupo de pacientes.



[ResMed.com/AirFitN20](https://www.ResMed.com/AirFitN20)



Características destacadas de AirFit N20

El arnés de felpa está específicamente diseñado para brindar más suavidad y estabilidad.

La almohadilla InfinitySeal™ ofrece lazos especialmente diseñados y diferentes niveles de grosor concebidos para prevenir soplos.

El armazón blando y flexible descansa debajo de los ojos y se adapta a diferentes tipos faciales, mientras que su relleno integrado ofrece mayor suavidad.

El codo de liberación rápida facilita la desconexión de los tubos de la mascarilla sin retirar la mascarilla.

Los broches magnéticos guían el arnés hacia el armazón de forma rápida y fácil.




AirFit N20 for Her

Diseñada específicamente para la mujer.

La serie AirFit N20 se ajustó a un excepcional porcentaje del 99 % de los pacientes en un reciente estudio internacional de ajuste.¹

Componentes de la mascarilla AirFit N20

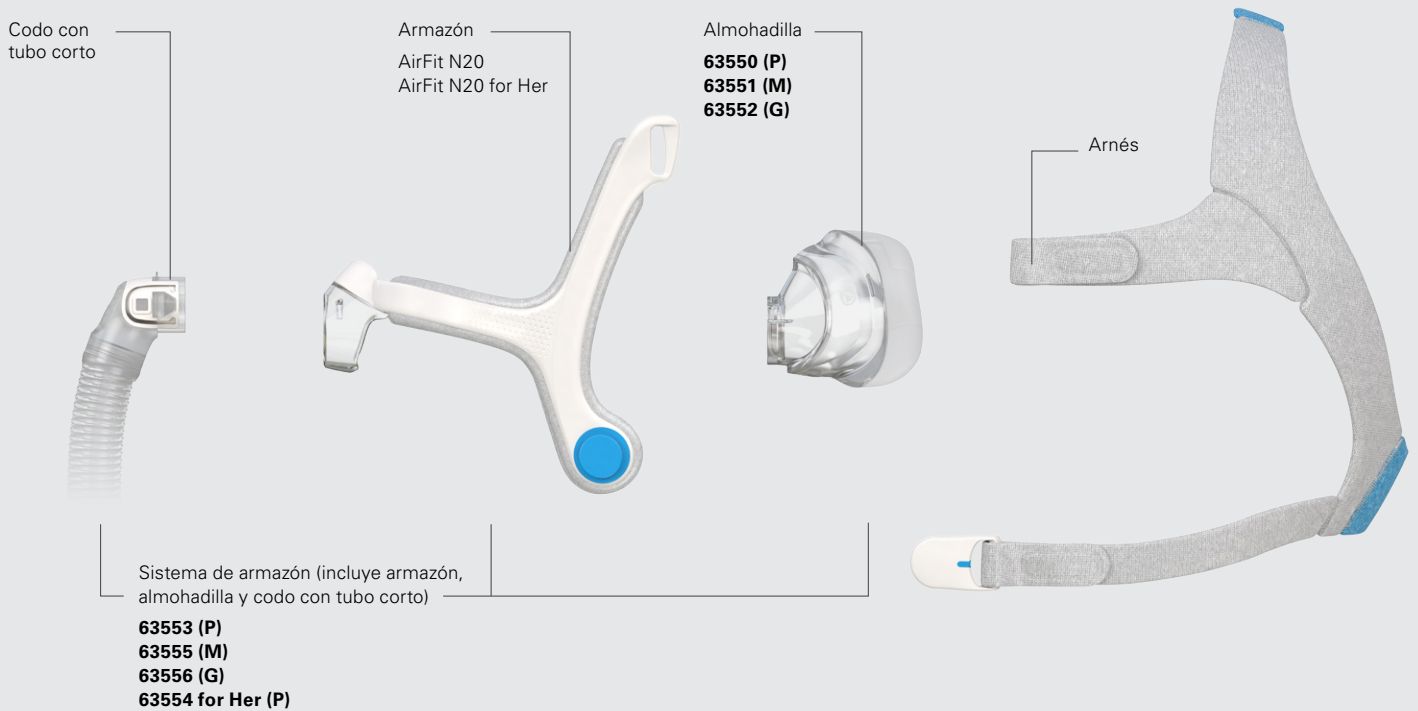

Códigos de producto

Sistemas completos de mascarillas (Incluye sistema de armazón + arnés)

AirFit N20: Pequeña	63503
AirFit N20: Mediana	63501
AirFit N20: Grande	63502
AirFit N20 for Her	63500



Arnés de la serie AirFit N20 con broches de arnés
63560 (P)
63561 (Est.)
63562 (G)



Arnés de la serie AirFit N20 for Her con broches de arnés
63558 (P)

AirFit™ N20



Guía de ajuste de la mascarilla AirFit N20



- Para comenzar, asegúrese de que los imanes situados en las correas inferiores estén desabrochados.
- Si están abrochados, dóblelos y sepárelos del armazón para desprenderlos.



- Coloque el arnés en la cabeza; asegúrese de que el logotipo quede hacia afuera.



- Posicione las correas inferiores de modo tal que ambas queden debajo de las orejas.
- Suba cada uno de los imanes de forma tal que encajen con sus correspondientes broches en el armazón.



- Ajuste las lengüetas de sujeción en las correas superiores hasta que la mascarilla se sienta pareja y estable.
- Vuelva a colocar las lengüetas de sujeción.



- Repita el paso 4 con las correas inferiores.
- Vuelva a colocar las lengüetas de sujeción.



- Conecte el tubo de aire del dispositivo al codo, luego coloque el codo de modo que haga "clic", en la parte frontal de la mascarilla.
- Encienda el dispositivo.



Consulte el manual del usuario para obtener más instrucciones y la información completa sobre la etiqueta en lo que concierne a las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

¹ Estudio internacional interno de ajuste de AirFit N20 de ResMed de pacientes actuales y nuevos con CPAP, realizado en noviembre de 2015.

Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. AirFit e InfinitySeal son marcas o marcas registradas de la familia de compañías de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © 2016 ResMed. 1019437/1 2016-11