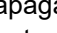






**5.2 Para ver la lectura promedio**  
 Su monitor puede calcular una lectura promedio basada en los resultados de las últimas 2 o 3 mediciones realizadas en el último periodo de 10 minutos.


**Nota**  
 •Configure el monitor con la fecha y hora correctas antes de tomar la medición para ver las lecturas promedio.


- Con el monitor apagado, mantenga presionado el botón  durante más de 2 segundos. El símbolo "  " parpadea.


**Nota**  
 •Si solo hay 2 lecturas en la memoria para ese periodo, el promedio se basará en estas 2 lecturas.
 •Si la lectura es alta (consulte la subsección 1.3), aparece el símbolo "  ".

## 6. Otras configuraciones

### 6.1 Borrado de todas las lecturas almacenadas en la memoria

- Presione el botón . Después de que aparece el número de memoria, se mostrará la última lectura.

2. Mientras mantiene presionado el botón , presione y mantenga presionado el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) durante más de 3 segundos. La pantalla de la derecha parpadea.

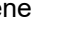
3. Mientras vuelve a mantener presionado el botón , presione y mantenga presionado el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) durante más de 3 segundos. La pantalla deja de parpadear y luego se borran todas las lecturas.


- Presione el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) para apagar el monitor.

**Nota**  
 •Se eliminarán todas las lecturas. No se pueden borrar parcialmente las lecturas almacenadas en la memoria.
 •El monitor se apaga automáticamente después de 2 minutos.

### 6.2 Cómo restaurar las configuraciones predeterminadas en el monitor

Para borrar toda la información almacenada en su monitor, siga las instrucciones que se presentan a continuación. Asegúrese de que el monitor esté apagado.

1. Mientras mantiene presionado el botón , presione y mantenga presionado el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) durante más de 3 segundos. La pantalla de la derecha parpadea.
















2. Mientras vuelve a mantener presionado el botón , presione y mantenga presionado el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) durante más de 3 segundos. La pantalla deja de parpadear y luego su monitor se restaura a la configuración predeterminada.






- Presione el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) para apagar el monitor.

**Nota**  
 •Al terminar, parpadea el año en la pantalla. Consulte la subsección 2.2 para configurar la fecha y la hora manualmente, o consulte la subsección 4.1 para conectar su monitor y configurar la fecha y la hora automáticamente.
 •Regresar a la configuración predeterminada de su monitor no borrará la información en la aplicación.

### 7. Mensajes de error y solución de problemas

Si ocurre alguno de los siguientes problemas durante la medición, compruebe que no haya ningún otro dispositivo eléctrico dentro de un radio de 30 cm. Si el problema persiste, consulte la tabla a continuación.

Pantalla/Problema	Causa posible	Solución
	Se presionó el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) para apagar el monitor. Después de insertar el conector del aire firmemente y de colocar el brazalete correctamente, presione el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener).	Presione de nuevo el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) para apagar el monitor.
	El conector del aire no está correctamente colocado en el monitor.	Coloque correctamente el conector del aire. Consulte la subsección 2.4.
	El brazalete no se ha colocado correctamente.	Vuelva a colocar el brazalete de manera correcta y luego tome otra medición. Consulte la subsección 2.4.
	El brazalete tiene una fuga de aire.	Reemplace el brazalete por uno nuevo. Consulte la sección 9.
	Se mueve o habla durante una medición y el brazalete no se infla lo suficiente.	Permanezca quieto y no hable durante la medición. Si aparece la leyenda "E2" repetidamente, infle el brazalete manualmente hasta que la presión sistólica esté entre 30 y 40 mmHg por encima de sus lecturas anteriores. Consulte la subsección 3.1.
	La presión sistólica está por encima de 210 mmHg y no se puede tomar una medida.	Infle el brazalete manualmente hasta que la presión sistólica esté entre 30 y 40 mmHg por encima de sus lecturas anteriores. Consulte la subsección 3.1.
	El brazalete está inflado pero excede la presión máxima permitida.	No toque el brazalete ni doble el tubo de aire mientras realiza una medición. Si infla el brazalete manualmente, consulte el subsección 3.1.
	Se ha movido o ha hablado durante la medición. Las vibraciones interrumpen la medición.	Permanezca quieto y no hable durante la medición.
		Vuelva a colocar el brazalete de manera correcta y luego tome otra medición. Consulte la subsección 2.4.
	La frecuencia del pulso no se ha detectado correctamente.	Permanezca quieto y sientese correctamente durante la medición. Si el símbolo "  " sigue apareciendo, le recomendamos que consulte a su médico.
	no parpadea durante una medición	
	El monitor tiene una falla.	Presione el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener). Si sigue apareciendo "Er", comuníquese con el distribuidor o minorista de OMRON.
	El monitor no puede conectarse con un smartphone o no transmite los datos correctamente.	Siga las instrucciones que se muestran en la aplicación "OMRON connect". Si el símbolo aparece después de revisar la aplicación, comuníquese con el distribuidor o minorista de OMRON.
	El monitor está esperando sincronizarse con el smartphone.	Consulte la subsección 4.1 para conectar el monitor con su smartphone, o presione el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) para cancelar la conexión y apagar su monitor.
	El monitor está listo para transferir sus lecturas al smartphone.	Abra la aplicación "OMRON connect" para transferir sus lecturas.

Pantalla/Problema	Causa posible	Solución
	Hay más de 48 lecturas en la memoria para ser transferidas.	Conecte o transfiera sus lecturas a la aplicación "OMRON connect" para que pueda mantenerlas en la memoria de la aplicación y para que desaparezca el símbolo de error.
	Hay 60 lecturas en la memoria para ser transferidas.	
	Las pilas están bajas.	Se recomienda reemplazar las 4 pilas por otras nuevas. Consulte la subsección 2.1.
	Las pilas están agotadas.	Cambie de inmediato las 4 pilas por nuevas. Consulte la subsección 2.1.
	Las pilas están agotadas.	
No aparece nada en la pantalla del monitor.	Las polaridades de las pilas no están alineadas correctamente.	Verifique que la colocación de las pilas sea la adecuada. Consulte la subsección 2.1.
Las lecturas son demasiado altas o demasiado bajas.	La presión arterial varía constantemente. Muchos factores, incluidos el estrés, la hora del día y la forma en que se coloca el brazalete, pueden afectar su presión arterial. Consulte las subsecciones 2.3 - 2.5 y la sección 3.	
Se presenta otro problema de comunicación.	Siga las instrucciones que se muestran en el smartphone, o visite la sección "Ayuda" en la aplicación "OMRON connect" para ver más información. Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor o minorista de OMRON.	
Se presenta otro tipo de problema.	Presione el botón [START/STOP] (Iniciar/Detener) para apagar el monitor, luego presiónelo de nuevo para tomar una medición. Si el problema continúa, quite todas las pilas y espere 30 segundos. Luego vuelva a colocar las pilas. Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor o minorista de OMRON.	

## 8. Mantenimiento

### 8.1 Mantenimiento

Para proteger su monitor de cualquier daño, siga estas instrucciones:

- Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados por el fabricante dejarán sin efecto la garantía del usuario.

### ⚠️ Precaución

•NO desarme ni trate de reparar este monitor ni otros componentes. Esto podría causar una lectura incorrecta.

## 8.2 Almacenamiento

Mantenga su monitor y los otros componentes en el estuche cuando no se use. Guarde el monitor y los otros componentes en un lugar limpio y seguro.

- Retire el brazalete del monitor.

### ⚠️ Precaución

•Para desconectar el conector de aire de plástico, sáquelo jalando de la base del tubo, y no del tubo.

- Doble suavemente el tubo de aire hacia el brazalete.

### Nota

- No doble ni pliegue el tubo de aire excesivamente.

- Coloque el monitor y los otros componentes en el estuche.

Características eléctricas	6 V  4.0 W
----------------------------	---

No almacene su monitor ni los otros componentes:

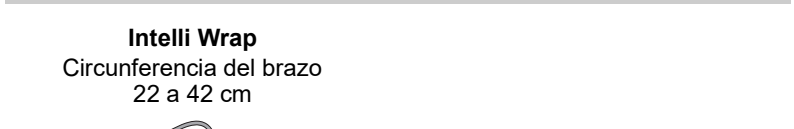
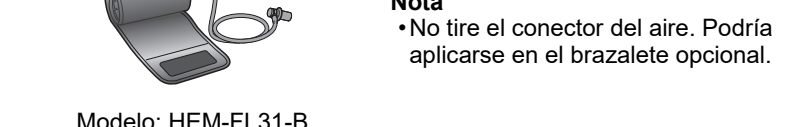
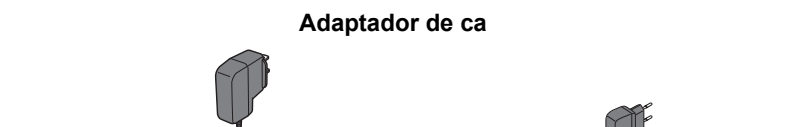

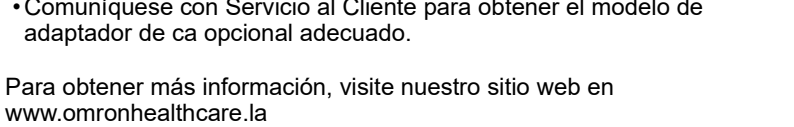
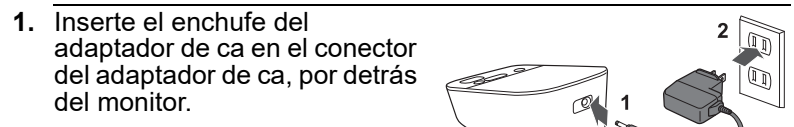
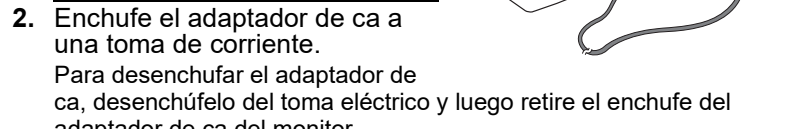
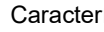
- Si el monitor y los otros componentes están mojados.
- En lugares expuestos a temperaturas extremas, humedad, luz directa del sol, polvo o vapores corrosivos como la lejía.
- En lugares expuestos a vibraciones o impactos.

### 8.3 Limpieza

- No use limpiadores abrasivos ni volátiles.
- Use un paño suave seco o un paño suave humedecido con un detergente suave (neutro) para limpiar el monitor y el brazalete, y luego límpie con un paño seco.
- No lave ni sumerja en agua el monitor, el brazalete ni los otros componentes.
- No use gasolina, diluyentes ni solventes similares para limpiar el monitor, el brazalete ni los demás componentes.

### 8.4 Eliminación

Siga las normativas locales correspondientes para desechar el monitor, los componentes y los demás accesorios. De no hacerlo, podría contaminar el medioambiente.

9. Accesorios opcionales		
 <p>Intelli Wrap Circunferencia del brazo 22 a 42 cm</p>	Circunferencia del brazalete aplicable al monitor 220 a 420 mm	
 <p>Modelo: HEM-FL31-B</p>	Memoria Almacena hasta 60 lecturas	
 <p>Adaptador de ca</p>	Contenido 1 monitor, 1 brazalete de brazo (HEM-FL31-B), 4 pilas "AA", 1 estuche, 1 manual de instrucciones, 1 guía de OMRON connect	
 <p>Modelo: HHP-AM01</p>	Protección contra descargas eléctricas Equipo electrónico (ME) de alimentación interna (si usa solo pilas) Equipo electrónico (ME) Clase II (Adaptador de ca opcional)	
 <p>Modelo: HHP-CM01</p>	Pieza aplicada Tipo BF (brazalete de brazo)	
<b>Nota</b>	•Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio. •Este monitor cumple los requerimientos de ISO 81060-2:2013. En el estudio de validación clínica, se usó K5 en 85 sujetos para determinar la presión arterial diastólica. •El monitor no se ha validado para su uso en pacientes en estado de embrazo. •La clasificación IP es el grado de protección provisto por un recinto según IEC 60529. Este monitor y el adaptador de ca opcional están protegidos contra objetos sólidos extraños de 12,5 mm de diámetro y de mayor tamaño, como un dedo. El adaptador de ca opcional está protegido contra gotas de agua que caen de forma vertical, que podrían causar problemas durante el funcionamiento normal. •El modo de funcionamiento tiene una clasificación de acuerdo con IEC60601-1. •Brazalete elaborado con materiales libres de látex.	
<b>Nota</b>	•Comuníquese con Servicio al Cliente para obtener el modelo de adaptador de ca opcional adecuado.	
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en <a href="http://www.omronhealthcare.la">www.omronhealthcare.la</a>		
<b>Uso del adaptador de ca (accesorio opcional)</b>		
<b>Nota</b>	•No coloque el monitor en un lugar donde sea difícil enchufar y desenchufar el adaptador de ca. •Recomendamos mantener constantemente las pilas colocadas en el monitor, incluso si elige usar el adaptador de ca. Si usa solo el adaptador de ca sin que estén colocadas las pilas en el monitor, es posible que deba restablecer la fecha y la hora cada vez que desenchufe y vuelva a enchufar el adaptador de ca. No se eliminarán las lecturas.	
<b>1.</b>	Inserte el enchufe del adaptador de ca en el conector del adaptador de ca, por detrás del monitor.	
<b>2.</b>	Enchufe el adaptador de ca a una toma de corriente. Para desenchufar el adaptador de ca, desenchúfelo del toma eléctrico y luego retire el enchufe del adaptador de ca del monitor.	
<b>⚠️ Precaución</b>		
•Use ÚNICAMENTE el adaptador de ca, el brazalete, las pilas y accesorios que se especifican para este monitor. El uso de adaptadores de ca, brazaletes y pilas no compatibles podría dañar o ser peligroso para este monitor.		
10. Especificaciones		
Modelo	HEM-7156T	
Pantalla	Pantalla digital LCD	
Rango de presión del brazalete	0 a 299 mmHg	
Rango de medición de la presión arterial	SYS: 60 a 260 mmHg DIA: 40 a 215 mmHg	
Rango de medición del pulso	40 a 180 latidos/min	
Precisión	Presión: ±3 mmHg Pulso: ±5 <span> </span> % de la lectura en pantalla	
Inflado	Automático por bomba eléctrica	
Desinflado	Válvula de liberación automática de presión	
Método de medición	Método oscilométrico	
Método de transmisión	<b>Bluetooth®</b> de baja energía	
Comunicación inalámbrica	Rango de frecuencia: 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz) Modulación: GFSK Potencia radiada aparente: <20 dBm	
Modo de funcionamiento	Funcionamiento continuo	
Clasificación IP	Monitor: IP20 Adaptador de ca opcional: IP21	
Características eléctricas	6 V  4.0 W	
Fuente de alimentación	4 pilas "AA" de 1.5 V o un adaptador de ca opcional (ENTRADA CA100 - 240 V 50 - 60 Hz 0.12 - 0.065 A)	
Vida útil de las pilas	Aproximadamente 1000 mediciones (con pilas alcalinas nuevas)	
Periodo de duración (vida útil)	Monitor: 5 años Brazalete de brazo: 5 años Adaptador de ca opcional: 5 años	
Condiciones de operación	+10 <span> </span> °C a +40 <span> </span> °C / 15 a 90 <span> </span> % de HR (sin condensación) / 800 a 1060 hPa	
Condiciones de almacenamiento/ transporte	-20 <span> </span> °C a +60 <span> </span> °C / 10 a 90 <span> </span> % de HR (sin condensación)	
Peso	Monitor: Aproximadamente 340 g (sin pilas incluidas) Brazalete de brazo: Aproximadamente 163 g	
Dimensiones	Monitor: Aproximadamente 105 mm (ancho) × 85 mm (alto) × 152 mm (largo) Brazalete de brazo: Aproximadamente 145 mm × 532 mm (tubo de aire: 750 mm)	

Intelli Wrap Circunferencia del brazo 22 a 42 cm	Circunferencia del brazalete aplicable al monitor 220 a 420 mm
Memoria	Almacena hasta 60 lecturas
Contenido	1 monitor, 1 brazalete de brazo (HEM-FL31-B), 4 pilas "AA", 1 estuche, 1 manual de instrucciones, 1 guía de OMRON connect
Protección contra descargas eléctricas	Equipo electrónico (ME) de alimentación interna (si usa solo pilas) Equipo electrónico (ME) Clase II (Adaptador de ca opcional)
Pieza aplicada	Tipo BF (brazalete de brazo)

**Nota**  
 •Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio.
 •Este monitor cumple los requerimientos de ISO 81060-2:2013. En el estudio de validación clínica, se usó K5 en 85 sujetos para determinar la presión arterial diastólica.
 •El monitor no se ha validado para su uso en pacientes en estado de embarazo.
 •La clasificación IP es el grado de protección provisto por un recinto según IEC 60529. Este monitor y el adaptador de ca opcional están protegidos contra objetos sólidos extraños de 12,5 mm de diámetro y de mayor tamaño, como un dedo. El adaptador de ca opcional está protegido contra gotas de agua que caen de forma vertical, que podrían causar problemas durante el funcionamiento normal.
 •El modo de funcionamiento tiene una clasificación de acuerdo con IEC60601-1.
 •Brazalete elaborado con materiales libres de látex.

**Acerca de la interferencia en la comunicación inalámbrica**  
 Este producto opera en la banda ISM sin licencia a 2.4 GHz. En caso de que este producto se use cerca de otros dispositivos inalámbricos, como LAN de microondas e inalámbricas, que funcionan en la misma banda de frecuencias del producto, existe la posibilidad de que ocurra interferencia. Si hay interferencia, detenga el funcionamiento de los otros dispositivos o vuelva a ubicar este producto alejado de dichos dispositivos inalámbricos antes de usarlo.

## 11. Garantía limitada

Se garantiza que el Monitor de Presión Arterial de Brazo Automático HEM-7156T y sus componentes, excluidas las pilas, estarán libres de defectos en materiales y en mano de obra durante el periodo de la garantía según se indica a continuación:

Monitor: 5 años

Brazalete: 1 año

Estos periodos son válidos a partir de la fecha de compra si se utiliza de acuerdo con las instrucciones que se suministran con este monitor.

La garantía a la que se hace referencia se extiende solo al comprador minorista original.

A consideración nuestra, reemplazaremos, sin costo alguno, cualquier monitor cubierto por la garantía arriba mencionada. El reemplazo es nuestra única responsabilidad y su único recurso bajo la garantía provista.

Para obtener servicio de garantía, llame a un distribuidor autorizado de OMRON en su país.

**LO QUE PRECEDE ES LA ÚNICA GARANTÍA PROVISTA POR OMRON EN RELACIÓN CON ESTE PRODUCTO, Y, POR LA PRESENTE, OMRON RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN PROPOSITO CONCRETO. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y OTROS TÉRMINOS IMPUESTOS POR LA LEY, SI EXISTIERAN, SE LIMITAN AL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA ARRIBA MENCIONADA.**

**OMRON NO SE HARÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO O CUALQUIER OTRO COSTO, GASTO O DAÑO ESPECIAL, FORTUITO, CONSECUENTE O INDIRECTO.**

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varíen por jurisdicción. Debido a requisitos locales especiales, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones antes mencionadas no apliquen en su caso.

PARA COMUNICARSE CON ATENCIÓN AL CLIENTE EN MÉXICO, LLAME AL 800-277-2509.
PARA COMUNICARSE CON ATENCIÓN AL CLIENTE EN OTROS PAÍSES, COMUNÍQUESE CON NUESTROS DISTRIBUIDORES LOCALES. VISITE [www.omronhealthcare.la](http://www.omronhealthcare.la)

## 12. Garantía exclusiva para México

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: OMRON HEALTHCARE MEXICO, S.A. DE C.V. BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 169, PISO 1, COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11520, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. TELÉFONO: 800-277-2509.
OMRON HEALTHCARE MEXICO, S.A. DE C.V. garantiza el MODELO DE MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DE BRAZO AUTOMÁTICO: ESFIGOMANÓMETRO ELECTRÓNICO Y AUTOMÁTICO HEM-7156T DE LA MARCA OMRON contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, sin costo adicional para el consumidor, por un periodo de 5 (cinco) años a partir de la fecha de compra del producto, siempre y cuando el producto se utilice de conformidad con las instrucciones proporcionadas. No se incluye el brazalete. El brazalete cuenta con una garantía contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, sin costo adicional para el consumidor, por un periodo de 1 (un) año a partir de la fecha de compra del producto, siempre y cuando el producto se utilice de conformidad con las instrucciones proporcionadas.

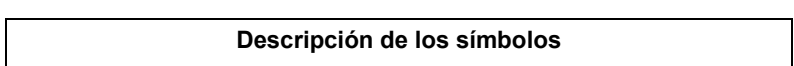

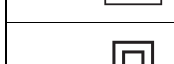
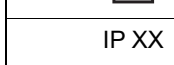





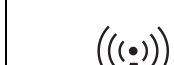

Las garantías descritas anteriormente se extienden solo al comprador minorista original. Las pilas que no forman parte del producto quedan excluidas de esta garantía. Esta garantía cubre todas las piezas y los componentes del producto e incluye la mano de obra. También incluyen los gastos de transporte del producto que derivan de su cumplimiento dentro de su red de servicios. Para hacer efectiva esta garantía, es posible que no se necesiten más requisitos que la presentación del producto, acompañado por esta política debidamente sellada por el vendedor donde se indique la fecha de venta del producto o la factura de compra (o recibo de venta en su caso). Para recibir el servicio de garantía o servicios posteriores de validación de la garantía, para validar la garantía o para obtener piezas, componentes, insumos y accesorios, o para fines de validación y mantenimiento fuera del periodo de garantía del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de OMRON Healthcare México SA CV, llamando a la línea gratuita al 800-277-2509 durante horas hábiles de 11:00 a 14:00, de lunes a viernes, o diríjase a BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 169, PISO 1, COLONIA GRANADA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CP 11520, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO en el mismo horario comercial. La empresa, según su criterio y sobre la base de su análisis, reemplazará el producto por otro sin cargo alguno, si la garantía así lo dispusiera. Le recordamos leer las instrucciones para el funcionamiento correcto del producto. Antes de pedir ayuda, consulte la sección "Resolución de problemas" en sus instrucciones.

Esta garantía NO podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

- Quando el producto se haya utilizado en condiciones que no sean las normales
- Quando el producto no se haya operado de acuerdo con las instrucciones incluidas
- Quando el producto haya sido modificado o reparado por personas no autorizadas por OMRON HEALTHCARE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Esta garantía otorgada deja sin efecto cualquier otra garantía ofrecida por el fabricante o distribuidor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MODELO DE MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICO: ESFIGOMANÓMETRO ELECTRÓNICO Y AUTOMÁTICO HEM-7156T DE LA MARCA OMRON
N.º DE SERIE: \_\_\_\_\_
DATOS DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_
RECUEDE CONSERVAR Y PRESENTAR EL RECIBO O FACTURA DE COMPRA DEL EQUIPO

13. Guía y declaración del fabricante	
	<b>Descripción de los símbolos</b>
	El usuario debe consultar el manual de instrucciones.
	Es necesario que el usuario siga este manual de instrucciones meticulosamente.
	Pieza aplicada - Tipo BF Grado de protección contra descargas eléctricas (corriente de fuga)
	Equipo Clase II. Protección contra descargas eléctricas
	Grado de protección IP provista por IEC 60529
	Indicaciones de polaridad del conector
	Solo para uso en interiores
	Corriente continua
	Corriente alterna
	Número de serie
	Indica el fabricante del dispositivo médico
	Identificador de brazaletes compatibles con el monitor
	Marcador en el brazalete, que deberá colocarse arriba de la arteria
	Circunferencia del brazo
	Indica niveles de radiación no ionizante generalmente elevados y potencialmente peligrosos; o indica equipos o sistemas, por ejemplo, en el área electromédica, que incluyen transmisores de RF o que intencionalmente aplican energía electromagnética de RF para diagnóstico o tratamiento.
	Esta información solo se colocará cuando se apruebe el registro. El logotipo de NOM está aprobado por NOM (Norma Oficial Mexicana) en México. Cumple con las leyes de ondas de radio.

**Monitor de presión arterial OMRON operado con pilas o con adaptador de ca. Información para los documentos incluidos en el ámbito de IEC60601-1-2:2014**

**Información importante respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC)**

Este monitor de presión arterial cumple con la norma de compatibilidad electromagnética (EMC) IEC60601-1-2:2014. No obstante, deberán tomarse precauciones especiales:
•El uso de accesorios y cables distintos a los especificados o a los provistos por OMRON podría ocasionar un aumento de emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética del monitor, así como un funcionamiento inadecuado.
•Durante la medición, deberá evitarse el uso del monitor junto con otro positivo ya que esto podría ocasionar un funcionamiento inadecuado. En caso de que su uso resulte necesario, deberá vigilarse que el monitor y el otro dispositivo demuestren un funcionamiento adecuado.
•Durante la medición, el dispositivo de comunicaciones de RF portátiles (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) deberá estar a una distancia menor de 30 cm con respecto a cualquier pieza del monitor, incluidos cables especificados por OMRON. De lo contrario, podría disminuir el rendimiento del monitor.

Fenómeno	Límites de EMISIÓN	Cumplimiento
EMISIONES de RF irradiadas y conducidas	CISPR 11	Grupo 1, Clase B
Fluctuaciones de voltaje y parpadeo	Consulte IEC 61000-3-3	Cumple

Fenómeno	Norma EMC básica	NIVELES DE LA PRUEBA DE INMUNIDAD
Descarga electrostática	IEC 61000-4-2	+8 kV por contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV por aire para recinto portuario
Campos electromagnéticos de RF irradiada	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2.7 GHz 80 <span> </span> % AM a 1 kHz para recinto portuario
Campos de proximidad provenientes de equipos de comunicación inalámbrica por RF	IEC 61000-4-3	Consulte la tabla 3
Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas	IEC 61000-4-4	±2 kV para puerto de alimentación con entrada de ca 100 kHz de frecuencia de repetición
Sobrevoltajes entre líneas	IEC 61000-4-5	+0.5 kV, ±1 kV para puerto de alimentación con entrada de ca
Alteraciones conducidas inducidas por campos de RF	IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms en ISM y banda de radioaficionados entre 150 kHz y 80 MHz 80 <span> </span> % AM a 1 kHz para puerto de alimentación con entrada de ca
Campos magnéticos a la frecuencia de alimentación	IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz o