

Instrucciones para la silla de transferencia



TCM-01S

Gracias por utilizar este producto; para utilizarlo de forma segura y correcta, lea atentamente este manual antes de operarlo.

Nombre del producto: Silla cómoda de transferencia

Composición de la estructura de la silla

Consta de soportes, ruedas, patas de base, brazos, componentes de control y reposabrazos. Productos pasivos.

Uso previsto

Se utiliza en instituciones médicas para trasladar y mover pacientes

Ambiente de trabajo

Altitud/Presión atmosférica	-390m ~ +5574m 50kpa ~ 106kpa
Temperatura	1°C ~ 40°C
Humedad	3 % ~ 75

Condiciones y métodos de transporte

Durante el transporte, cumpla los requisitos de las condiciones de almacenamiento, evite el aplastamiento y la luz solar directa; asimismo, preste atención a la prueba de humedad

Instrucciones

"Tomemos como ejemplo el traslado del paciente de la silla a la cama por parte del operador, el método de transferencia entre otros equipos es el mismo.

1. Esta silla se eleva mediante una bomba hidráulica y necesita una operación equilibrada. Cuando ascienda o descienda, primero determine si el usuario está en el centro del asiento. Al accionar la elevación, el operador debe pisar el punto central del pedal, esto asegurará que la bomba hidráulica alcance una altura constante durante la elevación.

1-a Método de elevación: El operador pisa el pedal a dos tercios de la profundidad, para ascender.


1-b Método de descenso: El operador pisa el pedal hasta el final y la silla de transferencia descenderá automáticamente. Suelte los pies a la altura adecuada.



2. Uso del interruptor de la hebilla del respaldo

2-a Método de apertura del asiento: Tire del pomo negro hacia afuera y gírelo 45 grados, manteniendo la manija abierta, luego presione el botón rojo del orificio de seguridad en el panel trasero, y el asiento podrá abrirse a izquierda y derecha.

2-b Método de cierre del asiento: Cierre el asiento hacia dentro, y después de que el pasador de posicionamiento esté en su sitio, gire el pomo negro en la ranura y, a continuación, alinee e inserte las hebillas de seguridad en el respaldo. (Asegúrese de que el pomo negro esté en su posición para mover al usuario)

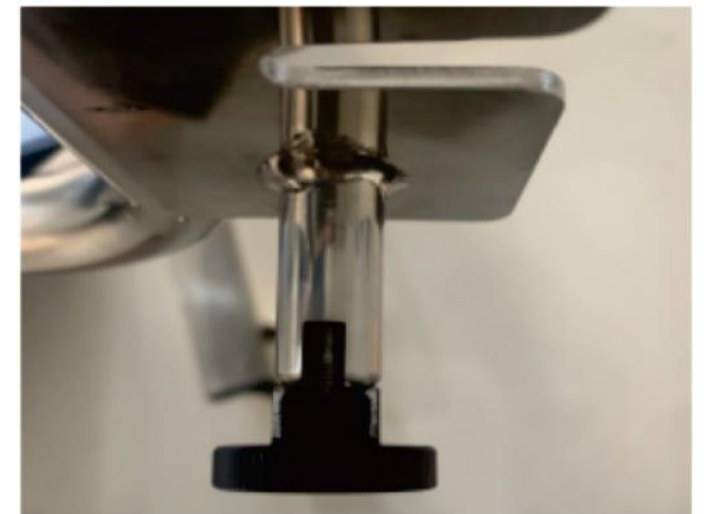

3. Ajuste de altura del asidero

El asidero tiene tres niveles de ajuste de altura que pueden regularse a la altura adecuada para el operador. Método de ajuste: Presione el punto elevado del botón rojo, mueva la empuñadura hacia arriba o hacia abajo para alcanzar la altura adecuada, suelte el pasador del botón y alinéelo con el orificio del mango para fijarlo automáticamente.



4 Instalación de la tabla de la mesa

Para utilizar la tabla de la mesa de comedor, debe extraerla primero, coloque la columna en la tabla de la mesa y alinee el poste con los orificios circulares situados a ambos lados de la pieza de fijación del asa, y colóquelos en el suelo al mismo nivel.



5. Uso del freno

Modo de frenado de las ruedas delanteras y traseras: pisar la placa ON prolongadamente para frenar, pisar la placa OFF brevemente para frenar.



USO DIARIO DE LA SILLA DE TRANSFERENCIA

1. Pida al paciente que se siente erguido y ajuste la altura del armazón del asiento del carro de traslado de modo que la superficie inferior del armazón esté ligeramente más alto que el plano del asiento;

2. Abra los armazones de los asientos a ambos lados y muévalos hacia adelante del paciente, de modo que el centro de gravedad esté en el centro del armazón del asiento; y ajuste de nuevo la altura del armazón modo que la parte inferior del armazón toque ligeramente la superficie del asiento;



3. Bloquee el freno de la rueda delantera de 5 pulgadas, levantando el pie del paciente y colocándolo sobre el pedal;

4. Pida al paciente que incline el cuerpo hacia la izquierda y hacia la derecha por turnos, mientras el operador gira un lado del marco del asiento para que el usuario pueda, a su vez, sentarse en la silla de cambio;

5. Cuando el paciente esté completamente sentado en el armazón del asiento, cierre los armazones izquierdo y derecho, bloquee el cierre y el cinturón de seguridad;



6. El paciente ajusta la postura de sentado y agarra los reposabrazos de los dos lados con ambas manos;

7. El operador comprueba la distancia entre la superficie inferior del armazón de la silla de cambio y el asiento, eleva el armazón del asiento 2~3 cm, suelta el freno de la rueda delantera y aleja lentamente la silla de cambio;




8. El operador empuja la silla de cambio desde atrás para desplazarse hasta el borde de la cama;

9. Compruebe la altura del armazón del asiento de la silla de cambio en el borde de la cama para asegurarse de que la superficie inferior del armazón del asiento esté ligeramente más alta que la superficie de la cama (si es necesario ajustar la altura del armazón del asiento, las ruedas delanteras deben estar bloqueadas para el funcionamiento);



10. El operador empuja completamente la silla de cambio hasta la posición predeterminada de la cama, bloquea el freno de las ruedas delanteras, y ajusta la altura del bastidor del asiento de modo que su superficie inferior toque ligeramente la superficie de la cama;

11. Abra los cinturones y los cierres de seguridad ubicados en el respaldo de la silla de cambio; seguidamente, abre lentamente los armazones izquierdo y derecho y deja que el paciente se siente en la cama;

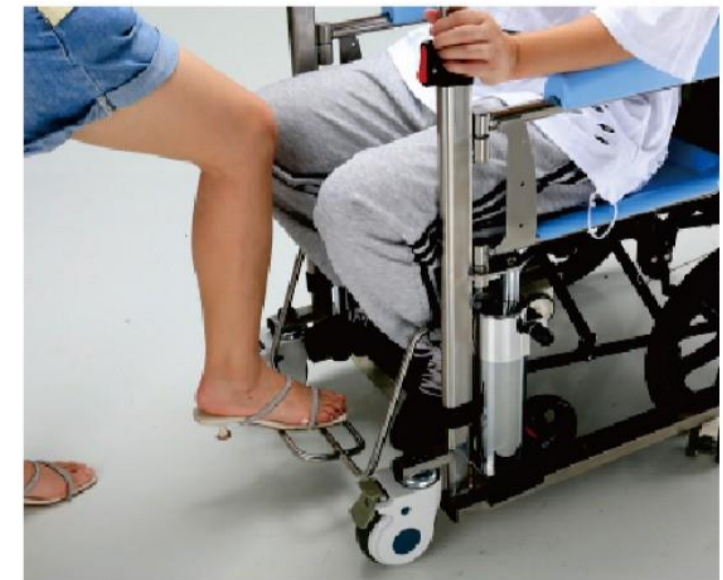

12.El operario desbloquea las ruedas delanteras, levanta los pies del paciente y aleja de la cama la silla de cambio.



* Es necesario ajustar la longitud del cinturón de seguridad a una posición adecuada antes del uso.

Mantenimiento y métodos de conservación

- No raye ni raspe la superficie del producto con objetos duros para evitar daños materiales;
- Para la limpieza y el mantenimiento diarios, aplique detergente sintético neutro, pase un paño húmedo y, a continuación, otro seco;
- No la ponga en contacto con ácidos y álcalis fuertes para evitar la corrosión;
- Compruebe periódicamente si hay tuercas y tornillos sueltos, piezas dañadas o rotas y, si es necesario, sustituya las partes dañadas.

Precauciones

Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, no deseche los productos y accesorios a voluntad, por favor deséchelos de acuerdo con los requisitos locales de protección del medio ambiente;

Advertencias y avisos

Se estipula que este producto solo puede ser utilizado por un médico o bajo su supervisión.

Mantenimiento, limpieza, desinfección

- 1.Compruebe que el producto no esté dañado y límpielo antes de utilizarlo.
 - 2.Limpieza: Para la limpieza, utilice un detergente suave o una solución jabonosa empapada en un paño tibio. El producto debe secarse después de la limpieza.
 3. Para desinfectar la superficie exterior, utilice un paño de algodón limpio humedecido en una solución de glutaraldehído al 2% o de hipoclorito sódico al 10 % para limpiar la superficie y, a continuación, elimine la solución con agua limpia.
- Nota: No sumerja el producto en líquido, y no permita que reciba radiación ultravioleta fuerte.
- 4.Finalmente secar con un paño de algodón limpio.

☀️Al utilizar otros desinfectantes o detergentes, el principio debe ser evitar dañar el producto.

Condiciones y métodos especiales de almacenamiento

El producto embalado debe almacenarse a una temperatura que no exceda los -0°C~40°C, humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos y en un local bien ventilado y limpio. Mantener alejado de la humedad, la luz solar y las fuentes de calor durante el transporte.

Contraindicaciones





NINGUNA

Tiempo de uso

Vida útil: La vida útil normal es de 5 años.


Nota: Preste atención a la protección del medio ambiente cuando deseche el equipo y hágalo de acuerdo con la normativa local y hospitalaria.

Explicación de los gráficos, símbolos, abreviaturas, etc. utilizados en las etiquetas de los productos médicos.

MARCA				
Explicación	NOTA, remítase al archivo adjunto	Evite el sol	Evite la lluvia	Consulte el manual

Parámetros del producto

Con un conocimiento más detallado de los productos, las compras pueden ser más precisas.

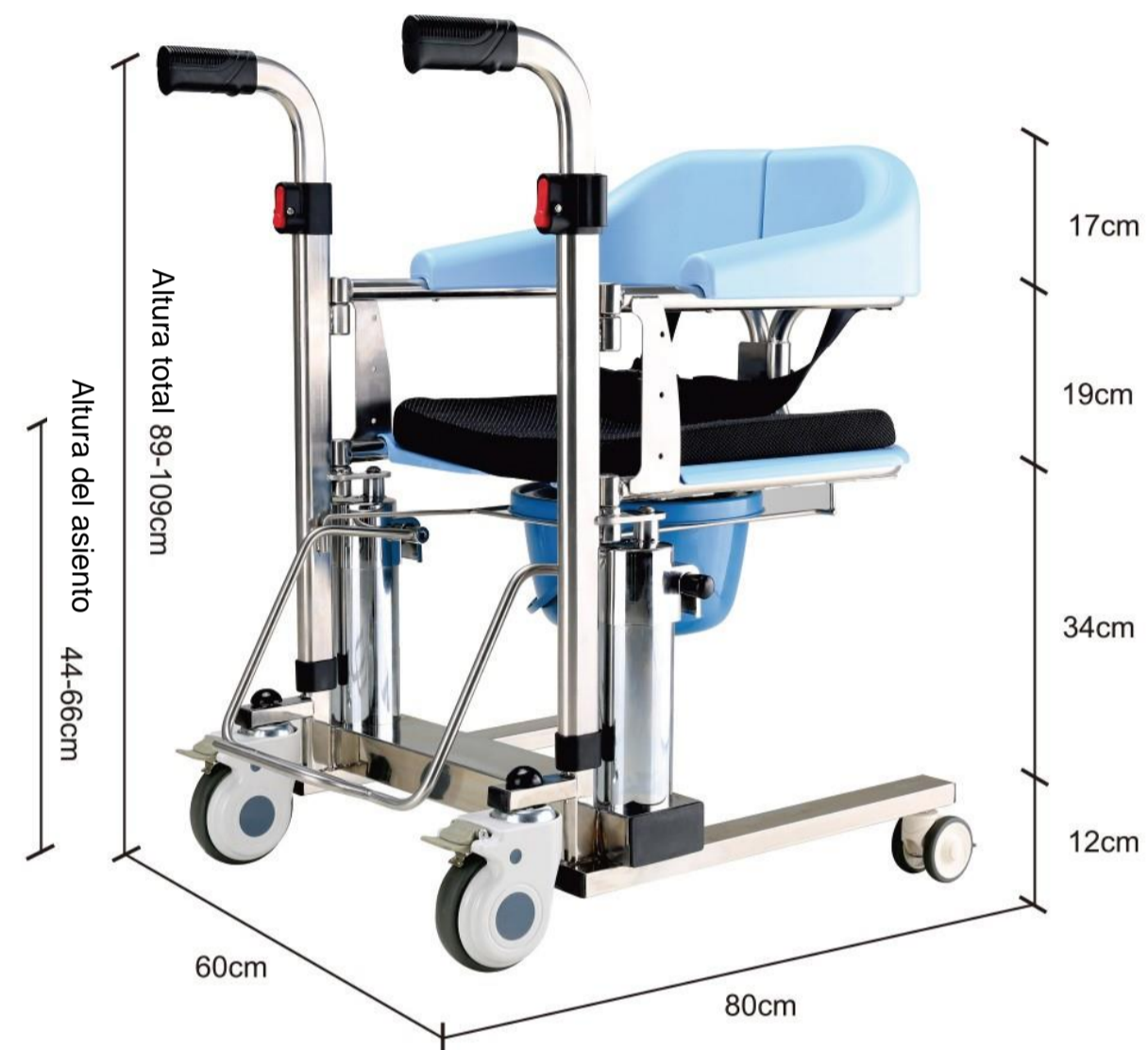

TCM-01S	N/W	G/W
Peso	32.5kg	35.5kg